

Carmol[®]
REUMATO
GEL RECE

REDUCE DURERILE ARTICULARE
ȘI MUSCULARE

Carmol Reumato gel rece este un produs recomandat în ameliorarea durerilor musculare și articulare și reducerea inflamației din entorse, luxații sau alte traumatisme minore, febră musculară sau episoade acute ale afecțiunilor reumatice.

Carmol Reumato gel rece reprezintă o alternativă optimă la antiinflamatoarele nesteroidiene pentru ameliorarea locală a durerii, prin acțiunea mentolului care produce un efect local de răcire și vasoconstricție, determinând calmarea durerii și un ușor efect anestezic, scăzând semnificativ percepția durerii.

Prezentare

Tub cu gel rece

| REF. | Formula de prezentare | Nr. bucăți/cutie individuală | UDI-DI |
|--------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| SI050B | Tub cu 50 ml gel rece | 1 | 5944729009027 |

Compoziție:

3% mentol, carbomer, alcool, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Beneficii clinice:

- Prin producerea fluxului local de sânge, gelul rece reduce tensiunile musculare, stimulează răspunsul local antiinflamator benefic pentru mușchi și articulații, în special cele care apar după eforturi fizice acute exacerbate sau prelungite și alte leziuni care implică țesutul musculo-articular și moale (vânătași, entorse minore, întinderi etc.)

- Efectul antiinflamator însoțit de o ameliorare imediată a durerii și o senzație de confort indusă de răcirea produsă de evaporarea progresivă și de lungă durată a gelului.

Caracteristici de performanță:

Carmol Reumato gel rece ajută la reducerea perioadei de recuperare după efort prelungit care a dus la dureri articulare și/sau musculare.

Indicații:

Produsul este recomandat în special pentru dureri musculare și articulare. A se utiliza înainte și după eforturi intense, pentru recuperări musculare, în caz de leziuni sportive, luxații și entorse, nevralgii minore și hiperaestezie.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la mentol sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza pe plăgi deschise, iritații ale pielii.

A nu se utiliza dacă există erupții cutanate, alergii, urticarie, eritem.

A nu se aplica pe plagă în combinație cu alte unguente, creme sau spray-uri.

A se utiliza la femeile însărcinate sau care alăptează strict sub supraveghere medicală.

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați gelul rece pe zona afectată, acoperiți cu un pansament neabsorbant, care va fi fixat cu un bandaj elastic sau pansament adeziv. Aplicarea poate fi repetată de 2-3 ori pe zi într-un strat subțire pe zona dorită a corpului, masajul nu este necesar. Clățiți mâinile cu apă rece.

