

Din grijă pentru dvs., Biofarm® vă oferă Extracare® Unguent pentru plăgi, un complex de ingrediente speciale alese pentru sănătatea dvs, ce reprezintă un tratament local al plăgilor, fără efecte secundare. Extracare® Unguent pentru plăgi, este un produs ideal pentru tratamentul local al plăgilor acute (arsuri până la gradul II, escoriații dermice, cicatrici hipertrofice și keloide, plăgi traumatice, diverse leziuni ale pielii) și cronice (ulcere venoase sau arteriale, escare), în faza de granulație și epitelizare precum și în zone post-peeling chimic sau laser și în zona donatoare de grefă cutanată, fiind ușor de utilizat.

### Compoziție:

Olivae oleum, helianthi oleum neutralisantum, cera, camphora, colophonium, boswellia, calendulae, ricini oleum, bismuthi, plantago, paraffinum liquidum.

### Indicații:

EXTRACARE® Unguent pentru plăgi este indicat în tratamentul local al plăgilor acute (arsuri până la gradul II, escoriații dermice, cicatrici hipertrofice și keloide, plăgi traumatice, diverse leziuni ale pielii) și cronice (ulcere venoase sau arteriale, escare), în faza de granulație și epitelizare precum și în zone post-peeling chimic sau laser și în zona donatoare de grefă cutanată.

### Mod de utilizare:

Curățați plaga folosind soluție hipertona sau ser fiziologic;  
În cazul utilizării anterioare a unui antiseptic, spălați abundant plaga cu soluție hipertona sau ser fiziologic înainte de aplicarea unguentului;  
Aplicați unguentul pe plagă într-un strat de până la 1 mm;  
La nevoie, acoperiți plaga cu un pansament secundar (compresă sterilă din tifon sau neșesut) care se fixează cu ajutorul unui bandaj extensibil sau fix, adeziv sau neadeziv.

### Mod de prezentare:

Flacon unguent 50 ml

### Precauții:

Dacă apar semnele unei infecții locale, tratamentul poate fi continuat numai cu acordul medicului.

Produsul este exclusiv pentru uz extern.

### Contraindicații:

Contraindicat la persoanele care au hipersensibilitate la oricare din componentele produsului.

Datorită modului de acțiune, pot apărea efecte nedorite, respectiv senzație de usturime sau arsură locală, timp de 30-40 min. Aceste efecte nu contraindică utilizarea produsului.

Decizia terapeutică va fi luată de către medic.

### Efecte adverse:

Nu s-au semnalat efecte adverse pe durata utilizării EXTRACARE® Unguent pentru plăgi.

### Alte atenționări:

După utilizare aruncați pansamentul secundar impregnat cu unguent la deșeurile biologice;

În cazul reutilizării există pericolul contaminării biologice.

A nu se resteriliza!

Produsul este de unică utilizare.

Steril numai dacă ambalajul nu este deteriorat

### A se depozita:

Ferit de umiditate și razele soarelui; la temperaturi de până la 35°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

### Produs pentru

#### SC BIOFARM SA

Str. Logofătul Tăutu, nr.99, sector 3, București, România

Telefon: 021 301 06 00

Fax: 021 301 06 05

e-mail: office@biofarm.ro

#### Produs de: TAISSIS CONCEPT S.R.L

Str. Ion Țicăloiu, nr.17

115100 Câmpulung, România

Tel: 0248 512 830

Fax: 0248 512 870

e-mail: office@taissis.ro

